



# HANDLEIDING

## Applicatie met één hand

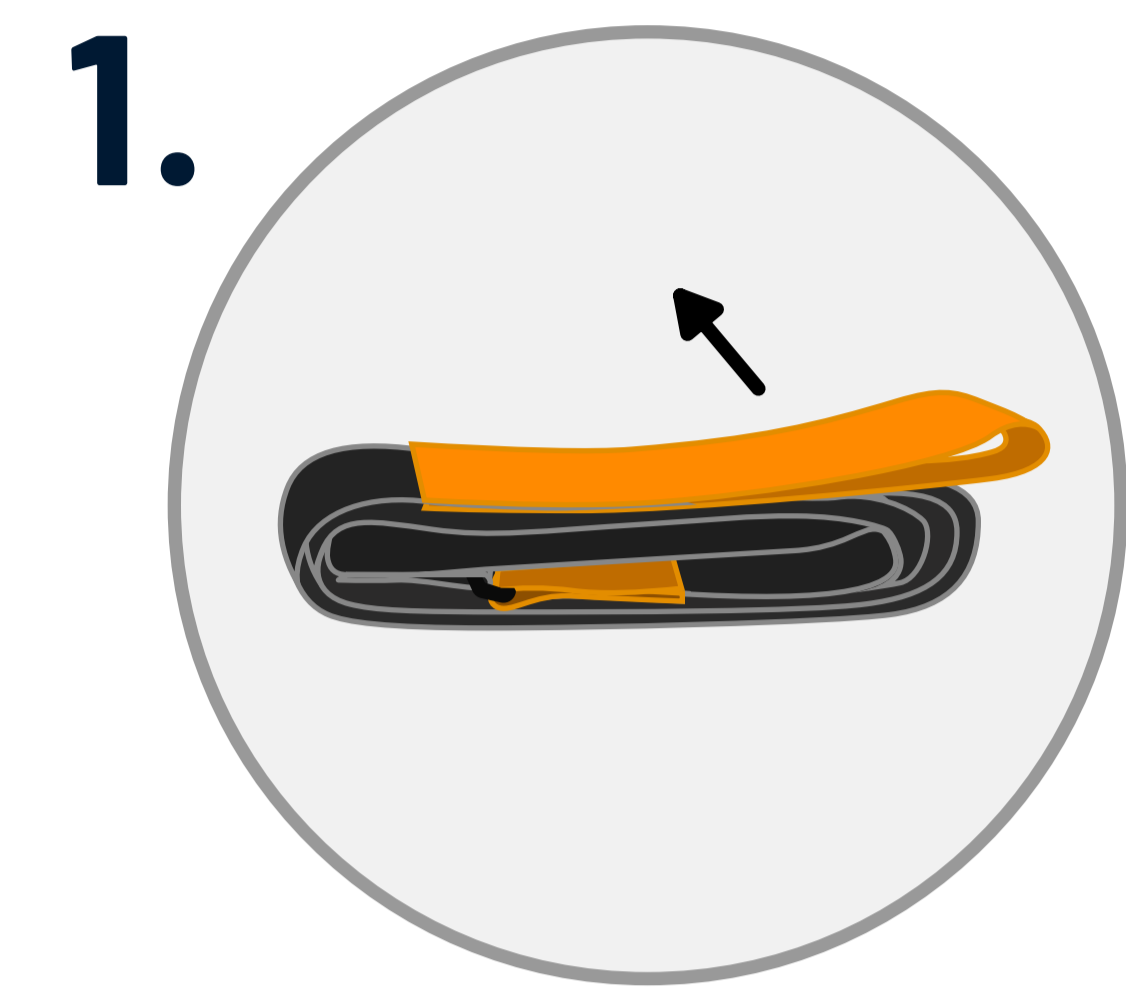

Open de verpakking en rol de tourniquet helemaal uit.

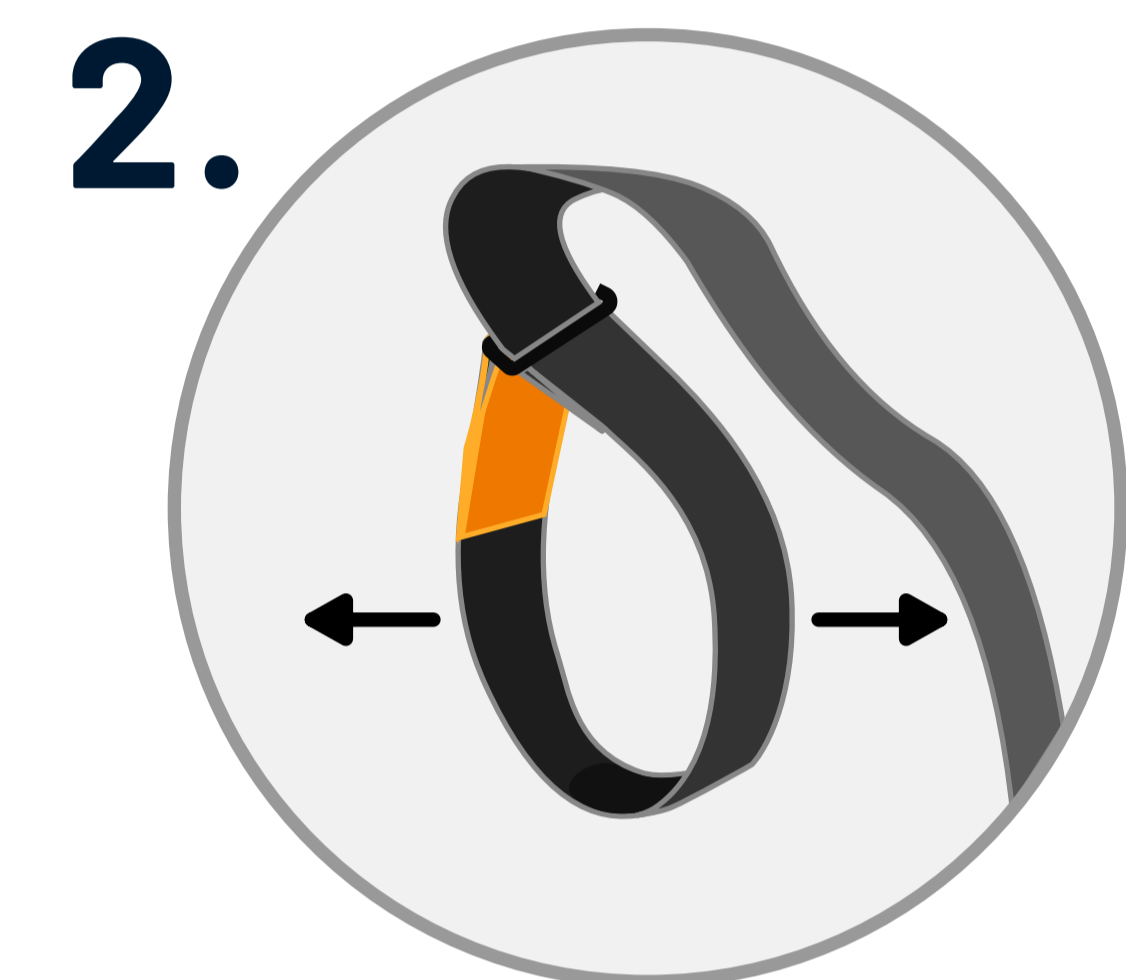

De tourniquet is voorzien van een **open lus**, zodat hij direct over het ledemaat geschoven kan worden.




Schuif de tourniquet over het aangedane ledemaat, **boven** het niveau van de bloeding.

**3.1** Plaats de tourniquet **5 tot 8 centimeter** boven de wond.


**3.2** Leg de tourniquet aan op de **arm** of het **been**.

! De tourniquet mag alleen worden aangebracht op een arm of been.

✗ Leg de tourniquet **nooit** aan op een gewricht!

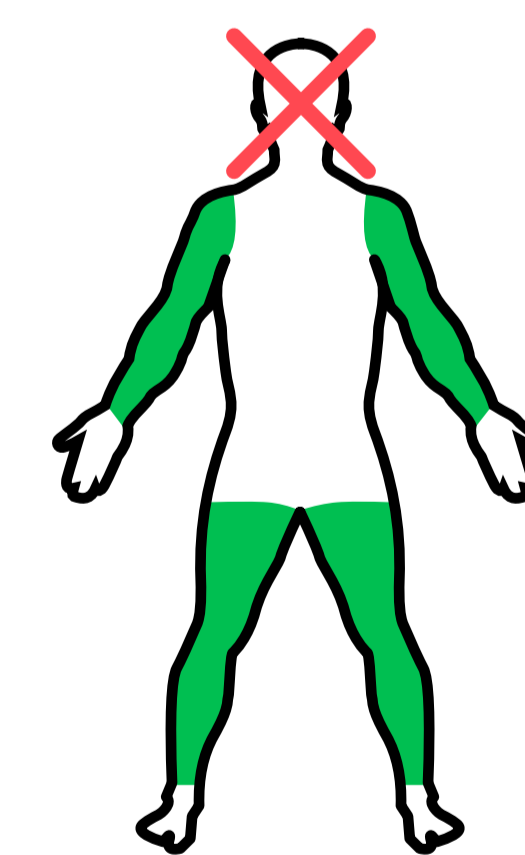


Trek aan de band, in de **richting van de pijl**, zodat de lus strak om het ledemaat zit.

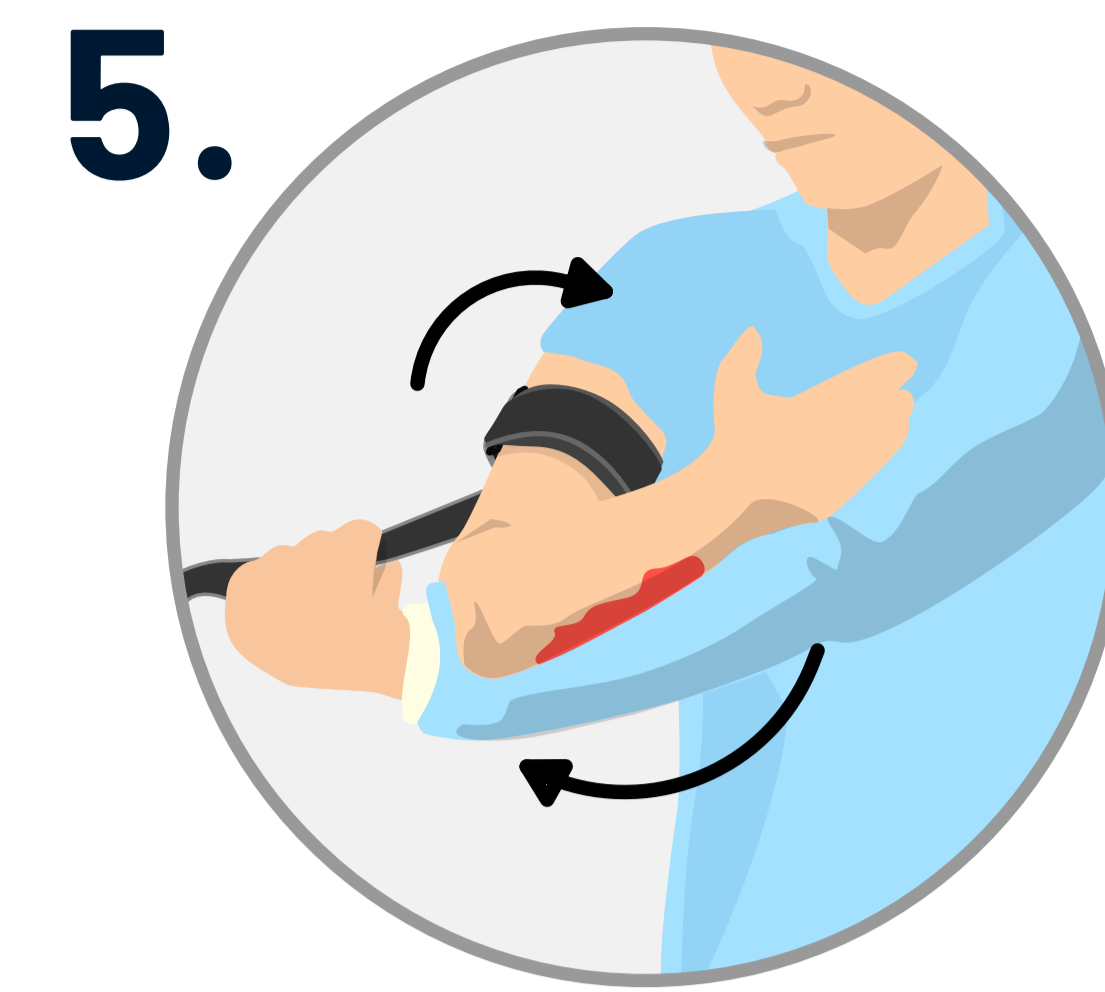

Wind de band **zo strak mogelijk** om het ledemaat terwijl je de compressie houdt door hard te blijven trekken.

**5.1** Gebruik de gehele lengte van de tourniquet

! Controleer bij elke winding of het bloeden afneemt.

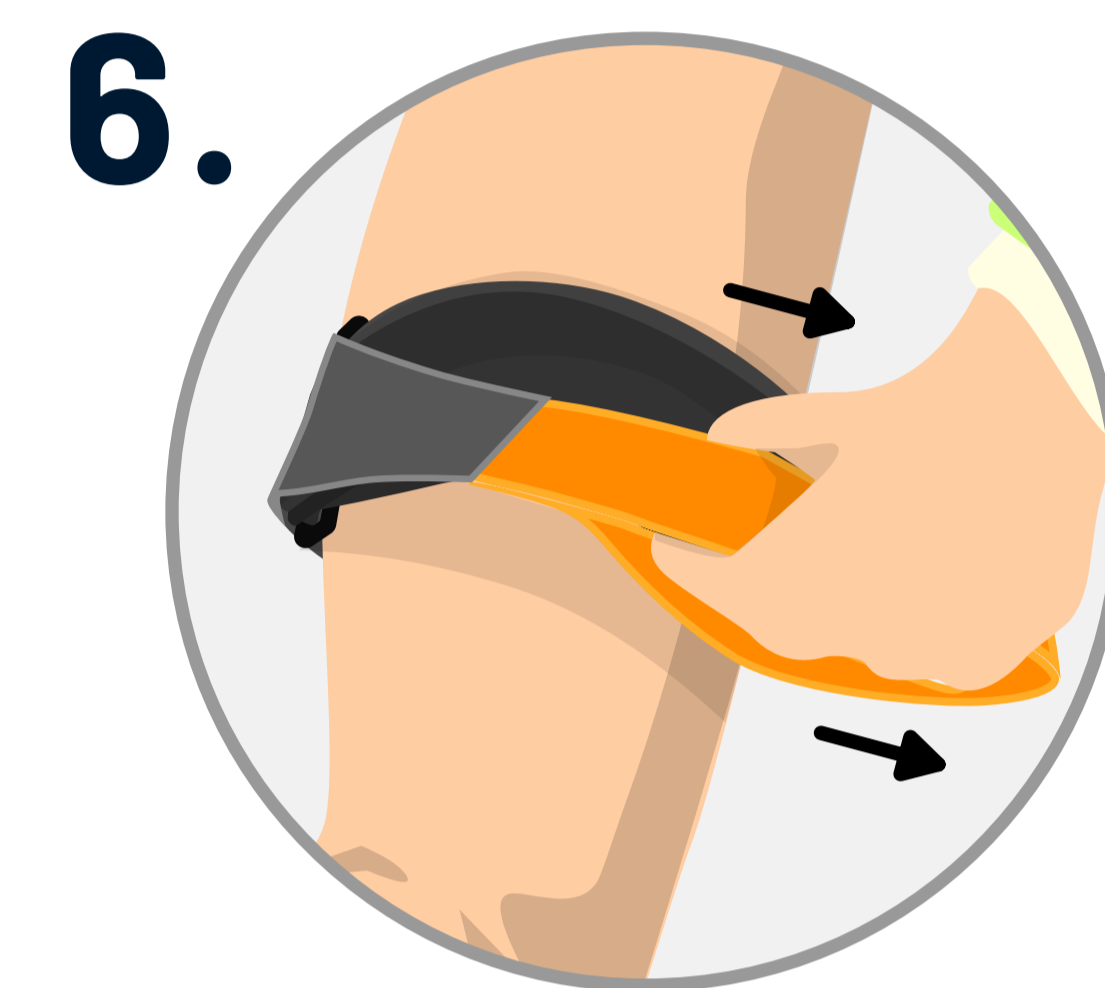

Gebruik bij de laatste slag het handvat om extra kracht te zetten en **zeker** het tourniquet met het klittenband.

! De tourniquet is hard genoeg aangetrokken als de bloeding **stopt**.



Gebruik het **veiligheidslijpje**, om onbedoeld losraken te voorkomen.



Controleer geregeld of er nog **volledige afsluiting** is.

! Controleer geregeld of er nog volledige afsluiting is. Door beweging en verandering in spierspanning kan de tourniquet losser gaan zitten.

! Het product is voor eenmalig gebruik. (Het product mag niet meerdere malen gebruikt worden).